

Mundschutz Anleitung

Stoffgröße : 38 cm x 20 cm

Gummiband oben 85 cm

Gummiband unten 2x 35 cm

Nur Baumwollstoff verwenden!!!

Bild 1

Einmal falten, so nähen dass ein Sack entsteht.

Dann den Sack umbürteln.

An der offenen Seite den Nasenbügel und das Gummiband 85 cm lang anlegen ,
doppelt umschlagen mit Stecknadeln fixieren.

Bild 2

Gut festnähen evtl. mit Zickzack noch einmal über das Gummiband nähen, sodass
das Gummiband nicht verrutschen kann. Auch die Seiten des Gummibandes
festnähen.

Bild 3, 4, 5

Den Stoff einmal mittig falten um die Mittellinie zu finden.
im oberen Bereich zwei Falten legen und feststecken.

Bild 6

Im unteren Bereich eine Falte legen und die Gummibänder jeweils links
und rechts mit feststecken.

Bild 7

Jetzt von oben nach unten alles fest zusammen nähen, an den Gummibandstellen
eine doppelte /dreifache Naht nähen, sodass die Gummibänder gut halten.

**WICHTIG: Die Falten verlaufen von oben nach unten und sind alle in die gleiche
Richtung zu legen.**

**Nur Baumwollstoff verwenden, da der Mundschutz atmungsaktiv und 90 C°
waschbar sein muss.**